

V VARDIS

SWITZERLAND
BIOMIMETIC DENTAL SCIENCE

CURODONT™ D'SENZ

Protection efficace pour les dents sensibles



- Gel à action rapide
- Fermeture efficace des tubules dentaires
- Facile à utiliser dans le cabinet et à la maison
- Idéal avant et après des sessions d'hygiène, les traitements de blanchiment et appropriée pour les patients périodontal
- Pour tous les patients de 6+ ans


MODE D'ACTION

CURODONT™ D'SENZ est un gel dentaire désensibilisant contenant la technologie vVARDIS à base de peptides, cliniquement éprouvée. La formule Oligo-Peptide¹⁰ forme une barrière protectrice stable sur la dentine exposée en raison de sa grande affinité avec le tissu dentaire. Les tubules dentinaires ouverts sont efficacement occlus en 2 minutes, empêchant ainsi la transmission des stimuli thermiques et de contact.

RÉSULTATS VISIBLES

CURODONT™ D'SENZ atteint une couverture presque complète des tubules dentinaires et montre une plus grande réduction du nombre et du diamètre des tubules ouverts par rapport aux principaux dentifrices désensibilisants¹.

Images au microscope électronique à balayage (2000x)

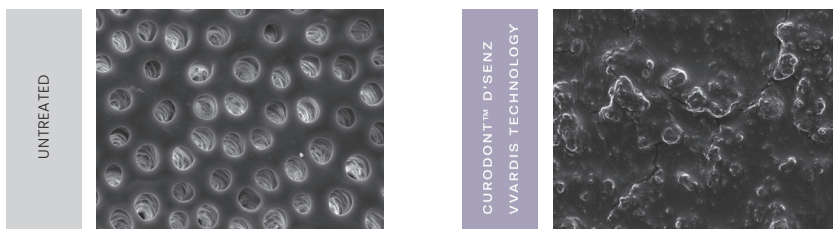

Dentine exposée avec
des tubules ouverts

Dentine avec CURODONT™ D'SENZ –
barrière protectrice stable créée après
une seule application.

TESTÉ CLINIQUEMENT

CURODONT™ D'SENZ aide à désensibiliser rapidement et efficacement les dents, en montrant une amélioration plus rapide de la sensibilité que les dentifrices anti-sensibilité les plus courants²:

- 80 % des patients ont signalé un soulagement après 7 jours.
- Même après l'arrêt de l'application de Curodont D'Senz au jour 7, la sensibilité a diminué jusqu'au jour 90 chez 70 % des patients.


APPLICATION SIMPLE

Au cabinet dentaire

CURODONT™ D'SENZ est appliqué par l'hygiéniste dentaire ou le dentiste à l'aide d'une cupule de polissage en caoutchouc, ou micro-brosse.

A la maison

Les patients peuvent l'appliquer avec leur doigt ou une brosse interdentaire. Laissez agir pendant 1 à 2 minutes. Recrachez le résidu si nécessaire.

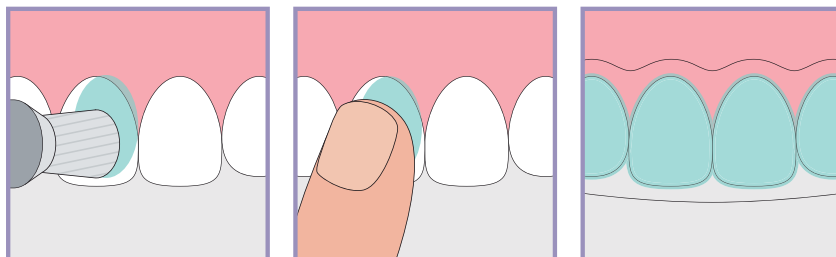

¹ Hill R. et al (2020) "An In Vitro Comparison of A Novel Self-Assembling Peptide Matrix Gel and Selected Desensitizing Toothpastes in Reducing Fluid Flow by Dentine Tubular Occlusion" J Dent Maxillofacial Res 3 (1) 1-11 Bröseler F et al. Clin Oral Investig. 2020 ; 24:123-1322

² Schlee, M., Rathe, F., Bommer, C., Bröseler, F., & Kind, L. (2018). Matrice peptidique auto-assemblée pour le traitement de l'hypersensibilité dentinaire : Un essai clinique contrôlé randomisé. Journal of Periodontology, 89(6), 653-660.